

# 手術用フェースガード MeGUARD〈ミーガード〉を お使いのお客様へお願い

ミーガードをご利用いただき、誠にありがとうございます。

## ミーガードフレームの装着位置

※フレームをかける位置にご注目ください。



以下の原因でフレームが落下する可能性がありますので、先ずはご確認いただくことをお願いしています。

### 1 装着位置の勘違いやズレがある場合。

当製品は、女性が多く利用するカチューシャをつける位置（個人により差はありますが）頭頂部付近に装着していただくことを想定して設計されており、この位置に正しく装着していただければ、テープにて固定する事無く、頭を振っても下を向いても簡単に落下することが無いようにフレームのカーブを工夫しております。

一般的なフェースガード（眼鏡フレームタイプ）と同様、額や前髪の生え際あたり（前頭部）に装着してしまうと、使用中にフレームごと落下する事象が起きてしまいます。

今一度、カチューシャをつける位置（個人により差はありますが）頭頂部付近に装着していただき、テープ固定をしなくても落下しないかをお確かめください。

### 2 フレーム本体が洗淨等による劣化や反復使用による経時変化で 角度が広がったり、弾力性が低下したりしている場合。

フレーム本体は恒久的に使用できるものではありません。新品のフレームと比較して、形状に広がりがない事や、劣化による弾力性の低下がないか確認していただき、変化が確認された場合は既使用製品の使用を中止して、フレーム本体を交換していただくことをお勧めしています。

